

Instrucciones de uso

AirFlex™ – Español

Descripción del Dispositivo: Los alineadores AirFlex™ son aparatos ortodónticos termoplásticos hechos a medida.

Indicación de Uso: Los alineadores AirFlex™ están indicados para la alineación de los dientes permanentes durante el tratamiento ortodóntico de la maloclusión.

Precaución: Solo con receta médica. La ley federal restringe la venta de este dispositivo únicamente a médicos o bajo su prescripción.

Contraindicaciones:

1. Pacientes cuyos dientes permanentes o segundos molares aún no hayan erupcionado.
2. Pacientes con mala higiene oral.
3. Pacientes con enfermedad periodontal activa.
4. Pacientes con prótesis dentales o implantes.

Advertencias:

1. Si presenta una reacción alérgica, suspenda el uso y contacte a su médico y al servicio de atención al cliente de OrthoFX.
2. El uso de los alineadores por menos de 12 horas al día puede prolongar el tiempo de tratamiento para lograr los resultados deseados.

Precauciones:

1. Los alineadores no son estériles, enjuáguelos antes de usarlos.
2. La ingestión accidental de los alineadores puede ser perjudicial.
3. Mantenga sus alineadores fuera del alcance de niños y mascotas.
4. Evite exponer los alineadores a líquidos calientes, ácidos, dulces o con colorantes.
5. No exponga sus alineadores a temperaturas excesivas.

Instrucciones de uso

AirFlex™ – Español

6. No use los alineadores AirFlex™ mientras come, bebe, mastica chicle o usa productos de tabaco. Cepílese los dientes y use hilo dental después de comer antes de volver a colocarse los alineadores.
7. Limpie sus alineadores diariamente después de cepillarse los dientes, frotándolos suavemente con un cepillo de dientes y jabón, y enjuagándolos con agua fría.
8. No utilice peróxido de hidrógeno, bicarbonato de sodio ni baños ultrasónicos para limpiar sus alineadores.
9. No utilice masticables ya que los alineadores podrían romperse.

Complicaciones:

Los alineadores AirFlex™ pueden causar efectos secundarios graves; sin embargo, estos ocurren en un pequeño número de personas. Su médico puede monitorearlo para detectar estos efectos. Las posibles complicaciones incluyen:

Molestias

1. Daño en los tejidos
2. Recaída (movimiento dental posterior al tratamiento) Extracciones (extracción de dientes)
3. Descalcificación y caries dental
4. Reabsorción radicular
5. Daño en los nervios
6. Enfermedad periodontal
7. Disfunción de la articulación temporomandibular (mandíbula)
8. Ajuste oclusal
9. Alergias
10. Problemas generales de salud
11. Complicaciones por terceros molares

Instrucciones de uso

AirFlex™ – Español

12. Complicaciones derivadas del uso de productos de tabaco

Si ocurre alguna de las complicaciones mencionadas, puede ser necesario remitirlo a su dentista de cabecera u otro especialista dental o médico para un tratamiento adicional.

Procedimiento Recomendado:

1. Retire con cuidado los alineadores AirFlex™ y cualquier accesorio adicional del paquete de OrthoFX y examínelos en busca de defectos. No use aparatos defectuosos.
2. Enjuague los alineadores AirFlex™ con agua fría.
3. Coloque los alineadores AirFlex™ de la etapa 01 en sus dientes superiores o inferiores según corresponda y presiónelos con los dedos para ajustarlos.
4. Use los alineadores de la etapa 01 durante al menos 12 horas al día durante una semana.
5. Los alineadores AirFlex™ se ajustarán firmemente y ejercerán presión sobre sus dientes. Esta presión disminuirá con el tiempo a medida que los use.
6. Use cada etapa de alineadores durante una semana antes de avanzar a la siguiente, o según lo prescrito por su médico.
7. Sus paquetes de alineadores están numerados secuencialmente para facilitar la identificación. Una vez que haya usado la etapa de alineador durante una semana, pase a la siguiente etapa.
8. Una vez que pase a la siguiente etapa de alineadores en su tratamiento, conserve el alineador previamente usado en el paquete original en caso de que pierda o dañe su juego actual. Antes de almacenarlo, enjuáguelo bien con agua fría.
9. Al finalizar el tratamiento, deseche los alineadores de acuerdo con las normativas locales.

Instrucciones de uso

AirFlex™ – Español

Nota: Puede notar una leve dificultad para hablar (ceceo) cuando comience a usar los alineadores. Esto generalmente desaparece después de unos días. También puede experimentar sequedad en la boca durante el tratamiento con alineadores; si es así, beba agua.

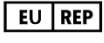
Periodo de Uso/Almacenamiento:

1. El alineador debe usarse al menos 12 horas al día.
2. No use el alineador después de la fecha de vencimiento impresa en la bolsa en la que se entregó.
3. Guarde sus alineadores en el estuche de alineadores OrthoFX provisto cuando no los esté usando.

Artículos Incluidos:

1. Alineadores AirFlex™
2. Estuche para alineadores.

Contactos:

- **Estados Unidos:** OrthoFX - 48890 Milmont Drive, Fremont, CA 94538
- **Australia:** OrthoFX Pty Ltd. Level 6 200 Adelaide St. Brisbane, QLD, 4000, Australia
- **Reino Unido:** Obelis UK LTD Sandford Gate, East Point Business Park OX4 6LB, Oxford England, UK
- **Europa:**  Obelis-Boulevard General Wahis, 53 1030, Brussels Belgium 060
- **India:** OrthoFX Private Limited, Floor 17, Trans Asia Cyber Park, Infopark Kochi Phase 2, Ambalamedu, Puthencruz, Ernakulam, Kerala, 682303.