

ELETTRODI STIMOLANTI & REGISTRANTI



BIONEN S.A.S.

Via P. Petrocchi, 42/1
50127 Firenze – Italia
www.bionen.it

BIONEN
medical devices

INFORMAZIONI GENERALI

Destinazione d'uso: EMG - EP. Trasferimento di segnali biologici captati dall'elettrodo allo strumento di registrazione.

Schema di funzionamento/utilizzo: EMG - EP. Trasferimento di segnali biologici captati dall'elettrodo allo strumento di registrazione.

Modalità d'uso: vedi varianti disponibili.

Precauzioni di utilizzo: collegare il cavo all'apposito elettrodo e alla relativa strumentazione.

Modalità di lavaggio: vedi varianti disponibili.

Modalità di disinfezione: La disinfezione del prodotto deve essere effettuata con processi validati, utilizzando uno dei seguenti prodotti, senza immersione nel liquido: Amocid, Lysoformin, Alhyndex, IndicinGG o equivalenti, reperibili sul mercato, anche ad alta concentrazione, in accordo alle disposizioni della struttura in cui l'articolo viene utilizzato.

Sterilizzazione: Dispositivo NON STERILE. Se necessario, sterilizzare ad Ossido di Etilene o a Raggi Gamma con processi validati.

Durata di vita: Dispositivo riutilizzabile. Non utilizzare dopo 5 anni dall'immissione in commercio.

Manipolazione e conservazione del dispositivo: Non occorrono particolari precauzioni per la manipolazione e per l'immagazzinamento ma è buona norma riporre gli elettrodi nella loro busta richiudibile dopo il lavaggio.

Confezionamento: busta minigrip richiudibile.

Controindicazioni e interazioni: nessuna.

Eventuale tossicità dichiarata: nessuna. LATEX FREE

Modalità di trasporto e smaltimento: non sono previste particolari modalità di trasporto e smaltimento.

Codice CND: N010101

N. Repertorio Dispositivi Medici: 25062

Normativa: Dispositivo di classe I

Conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e prodotto in accordo alle procedure del Sistema Qualità BIONEN certificato ISO 13485.




ELETTRODI STIMOLANTI & REGISTRANTI

VARIANTI

- Stimolatore a forma piatta con fascia e feltri
- Stimolatore con bracciale di fissaggio in velcro o manopola, feltri o elettrodi metallici
- Stimolatore a forchetta
- Stimolatore monopolare

Modalità d'uso con elettrodi metallici: Poggiare l'elettrodo/elettrodi dello stimolatore sul punto da stimolare esercitando una leggera pressione.

Modalità di lavaggio con elettrodi metallici: Lavare lo stimolatore dopo l'uso con un panno bagnato. Non immergere in liquidi.

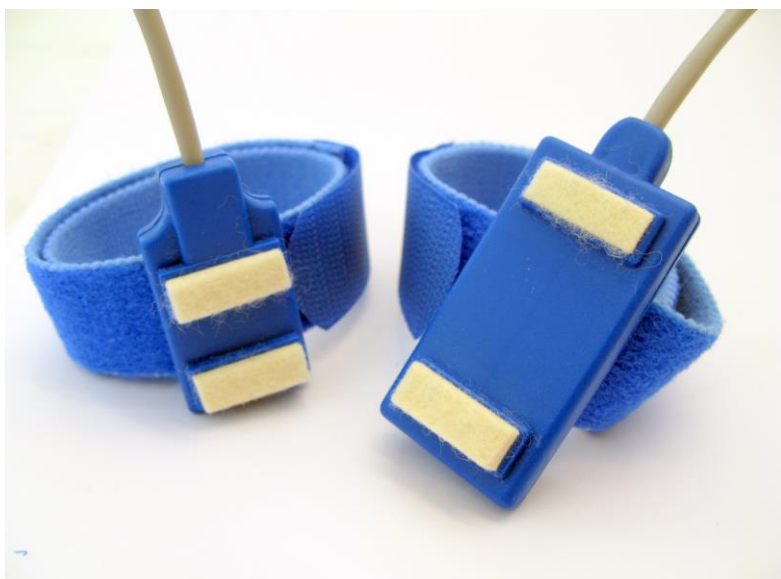

Modalità d'uso con elettrodi in feltro: Immergere i feltrini dell'elettrodo in una soluzione salina allo 0,9%. Pulire la cute del paziente ed applicare l'elettrodo utilizzando la fascia a corredo. Collegare i terminali all'apparecchio assicurandosi che ci sia un'impedenza di contatto ottimale.

Modalità di lavaggio con elettrodi in feltro: Lavare i feltrini dopo ogni esame, con acqua e detergente neutro. Utilizzare una garza per la pulizia del cavo e del corpo dell'elettrodo.



ELETTRODI STIMOLANTI & REGISTRANTI

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:

REF.	UM	N°	L CAVO	CONNETTORE APPARECCHIO	FASCIA	ACCESSORI MANOPOLA	ELETTRODI	DISTANZA ELETTRODI	MISURA	UTILIZZO
0038.001	NR.	1	150 cm	DIN 3 PIN	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	REMOVIBILE ROTONDA	FELTRO + METALLICI	25 mm	ADULTI	REGISTRAZIONE
0038.002	NR.	1	150 cm	3 FMM D=1,5mm	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	REMOVIBILE ROTONDA	FELTRO + METALLICI	25 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.003	NR.	1	150 cm	DIN 5 PIN	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	REMOVIBILE ROTONDA	FELTRO + METALLICI	25 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.004	NR.	1	150 cm	3 MCH D=2mm	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	REMOVIBILE ROTONDA	FELTRO + METALLICI	25 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.010	NR.	1	150 cm	DIN 5 PIN	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	REMOVIBILE ROTONDA	FELTRO + METALLICI	12 mm	PEDIATRICO	STIMOLAZIONE
0038.011	NR.	1	150 cm	DIN 3 PIN	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	REMOVIBILE ROTONDA	FELTRO + METALLICI	12 mm	PEDIATRICO	REGISTRAZIONE
0038.012	NR.	1	150 cm	3 MCH D=2mm	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	REMOVIBILE ROTONDA	FELTRO + METALLICI	12 mm	PEDIATRICO	STIMOLAZIONE
0038.013	NR.	1	150 cm	3 FMM D=1,5mm	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	REMOVIBILE ROTONDA	FELTRO + METALLICI	12 mm	PEDIATRICO	STIMOLAZIONE
0038.014	NR.	1	130 cm	2 PIN KEY	-	NON REMOVIBILE A T	METALLICI	31 mm	ADULTI	REGISTRAZIONE
0038.015	NR.	1	130 cm	2 FMM D=1,5mm	-	NON REMOVIBILE A T	METALLICI	31 mm	ADULTI	REGISTRAZIONE
0038.016	NR.	1	130 cm	DIN 5 PIN	-	NON REMOVIBILE A T	METALLICI	31 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.021	NR.	1	150 cm	DIN 3 PIN	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	40 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.022	NR.	1	150 cm	DIN 5 PIN	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	40 mm	ADULTI	REGISTRAZIONE
0038.022-200	NR.	1	200 cm	DIN 5 PIN	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	40 mm	ADULTI	REGISTRAZIONE
0038.023	NR.	1	150 cm	3 FMM D=1,5mm	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	40 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.024	NR.	1	150 cm	3 MCH D=2mm	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	40 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.031	NR.	1	150 cm	DIN 3 PIN	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	20 mm	PEDIATRICO	REGISTRAZIONE
0038.032	NR.	1	150 cm	DIN 5 PIN	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	20 mm	PEDIATRICO	REGISTRAZIONE
0038.033	NR.	1	150 cm	FMM D=1,5mm	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	20 mm	PEDIATRICO	REGISTRAZIONE

ELETTRODI STIMOLANTI & REGISTRANTI

REF.	UM	N°	L CAVO	CONNETTORE APPARECCHIO	FASCIA	ACCESSORI MANOPOLA	ELETTRODI	DISTANZA ELETTRODI	MISURA	UTILIZZO
0038.034	NR.	1	150 cm	MCH D=2mm	VELCRO L=35cm H=30mm	-	FELTRO	20 mm	PEDIATRICO	REGISTRAZIONE
0038.201	NR.	1	150 cm	FMM D=1,5mm	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	-	METALLICI	20 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.202	NR.	1	300 cm	FMM D=1,5mm	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	-	METALLICI	20 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.203	NR.	1	150 cm	FMM D=1,5mm	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	-	METALLICI	11 mm	PEDIATRICO	STIMOLAZIONE
0038.204	NR.	1	300 cm	FMM D=1,5mm	COTONE ELASTICO L=38cm H=25mm	-	METALLICI	11 mm	PEDIATRICO	STIMOLAZIONE
0038.210	NR.	1	300 cm	2 PINS KEY	COTONE ELASTICO L=240cm H=40mm	-	METALLICI	28 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.211	NR.	1	300 cm	2 PINS KEY	COTONE ELASTICO L=240cm H=40mm	-	METALLICI	28 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.212	NR.	1	300 cm	2 PINS KEY	COTONE ELASTICO L=160cm H=30mm	-	METALLICI	20 mm	PEDIATRICO	STIMOLAZIONE
0038.213	NR.	1	300 cm	2 PINS KEY	COTONE ELASTICO L=160cm H=30mm	-	METALLICI	20 mm	PEDIATRICO	STIMOLAZIONE
0038.214	NR.	1	150 cm	2 PINS KEY	COTONE ELASTICO L=240cm H=40mm	-	METALLICI	28 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0038.215	NR.	1	150 cm	2 PINS KEY	COTONE ELASTICO L=240cm H=40mm	-	METALLICI	28 mm	ADULTI	STIMOLAZIONE
0039.000	NR.	1	150 cm	DIN 5 PIN	-	-	METALLICI	-	-	STIMOLAZIONE
0039.001	NR.	1	150 cm	DIN 3 PIN	-	-	METALLICI	-	-	STIMOLAZIONE
0039.002	NR.	1	150/300 cm	FMM D=1,5mm	-	-	METALLICI	-	-	STIMOLAZIONE
0039.002P	NR.	1	150/300 cm	FMM D=1,5mm	-	-	METALLICI	-	-	STIMOLAZIONE
0039.004	NR.	1	150 cm	MCH D=2mm	-	-	METALLICI	-	-	STIMOLAZIONE
0039.201	NR.	1	150 cm	FMM D=1,5mm	-	-	METALLICI	-	Ø=5 mm	MONOPOLARE
0039.202	NR.	1	150 cm	FMM D=1,5mm	-	-	METALLICI	-	Ø=2 mm	MONOPOLARE



ELETTRODI STIMOLANTI & REGISTRANTI

ACCESSORI:

REF.	UM	N°	DESCRIZIONE	MISURA	UTILIZZARE CON:
4141.001	CF	100	FELTRINI DI RICAMBIO	RETTANGOLARI	STIMOLATORE A FORMA PIATTA
4141.002	CF	100	FELTRINI DI RICAMBIO	ROTONDI	STIMOLATORE CON BRACCIALE
4141.003	CF	10	FELTRINI DI RICAMBIO	ROTONDI	STIMOLATORE CON BRACCIALE
4141.004	CF	10	FELTRINI DI RICAMBIO	RETTANGOLARI	STIMOLATORE A FORMA PIATTA
0062.020	NR.	1	FASCIA IN VELCRO AZZURRA	H=2,5 mm, L=30 mm	STIMOLATORE A FORMA PIATTA
0062.021	NR.	1	FASCIA IN VELCRO AZZURRA	H=2,5 mm, L=45 mm	STIMOLATORE A FORMA PIATTA
0062.026	NR.	1	FASCIA IN VELCRO WRAPAROUND AZZURRA	H=2,5 mm, L=45 mm	STIMOLATORE A FORMA PIATTA
0062.031	NR.	1	FASCIA IN VELCRO AZZURRA	H=2 mm, L=40 mm	STIMOLATORE A FORMA PIATTA

