


ELETTRODI AD ANELLO

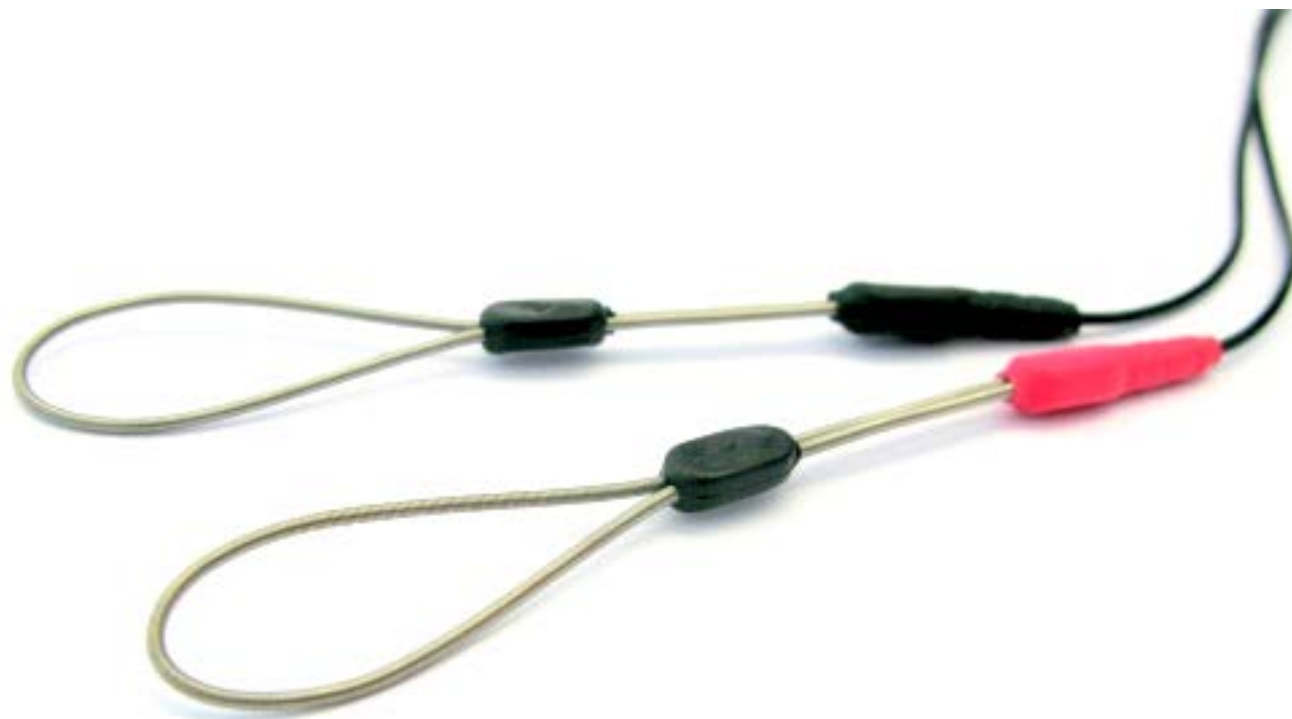

BIONEN S.A.S.

Via P. Petrocchi, 42/1
50127 Firenze – Italia
www.bionen.it

BIONEN
medical devices

INFORMAZIONI GENERALI

Destinazione d'uso: Elettromiografia (EMG)

Schema di funzionamento/utilizzo: Trasferimento di segnali biologici captati dall'elettrodo allo strumento di registrazione.

Precauzioni di utilizzo: Fissare l'elettrodo nel punto in cui deve essere rilevato il segnale. L'elettrodo è previsto per un uso ripetuto e può pertanto essere soggetto a degrado. Si raccomanda di controllare l'integrità dell'elettrodo prima di ogni applicazione sul paziente

Modalità di lavaggio: Dopo l'uso lavare sempre l'elettrodo con acqua. Lasciare asciugare e riporre in una busta di polietilene richiudibile equivalente a quella di vendita con le presenti istruzioni.

Modalità di disinfezione: La disinfezione del prodotto deve essere effettuata con processi validati, utilizzando uno dei seguenti prodotti, senza immersione nel liquido: Amocid, Lysoformin, Alhyndex, IndicinGG o equivalenti, reperibili sul mercato, anche ad alta concentrazione, in accordo alle disposizioni della struttura in cui l'articolo viene utilizzato.

Sterilizzazione: Dispositivo NON STERILE che non necessita di sterilizzazione prima dell'uso. Se necessario, sterilizzare con processi validati ad Ossido di Etilene o a Raggi Gamma.

Durata di vita: Dispositivo riutilizzabile per 100-300 volte. Non utilizzare dopo 5 anni dall'immissione in commercio

Manipolazione e conservazione del dispositivo: Non occorrono particolari precauzioni per l'immagazzinamento ma è buona norma riporre gli elettrodi nella loro busta richiudibile dopo il lavaggio .

Confezionamento: busta minigrip richiudibile.

Controindicazioni e interazioni: nessuna.

Eventuale tossicità dichiarata: nessuna. LATEX FREE

Modalità di trasporto e smaltimento: non sono previste particolari modalità di trasporto e smaltimento.

Codice CND: Z12101106

N. Repertorio Dispositivi Medici: 16759

Normativa: Dispositivo di classe I, non sterile

Conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e prodotto in accordo alle procedure del Sistema Qualità BIONEN certificato ISO 13485.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:

REF.	UM	N°	TIPOLOGIA:	L CAVO	CONNETTORE APPARECCHIO	COLORE	DESTINAZIONE
0036.001	NR.	1 COPPIA	ELASTICI	150 cm	TUKEL 3 CTT	GRIGIO	ADULTI DIGITALE
0036.002	NR	1 COPPIA	ELASTICI	150 cm	FMM D=1,5mm	GRIGIO	ADULTI DIGITALE
0036.003	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	150 cm	FMM D=1,5mm	GRIGIO	PEDIATRICO DIGITALE
0036.101	NR	1 COPPIA	ELASTICI	150 cm	TUKEL 5 CTT	GRIGIO	ADULTI DIGITALE
0036.102	NR	1 COPPIA	ELASTICI	150 cm	TUKEL + COCCODRILLO	GRIGIO	ADULTI DIGITALE
0036.111	NR	1 COPPIA	ELASTICI	150 cm	DRITTO	GRIGIO	ADULTI DIGITALE
0036.201	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	150 cm	TUKEL 5 CTT	GRIGIO	ADULTI DIGITALE
0036.203	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	120 cm	2 FMM D=1,5mm	GRIGIO / ROSSO NERO	ADULTI DIGITALE
0036.203	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	150 cm	TUKEL 3 CTT	GRIGIO	ADULTI DIGITALE
0036.301	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	100 cm	FMM D=1,5mm	GRIGIO	ADULTI PENIENO
0036.302	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	100 cm	FMM D=1,5mm SCHERMATO	GRIGIO	ADULTI PENIENO
0036.303	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	150 cm	FMM D=1,5mm SCHERMATO	GRIGIO	ADULTI PENIENO
0036.304	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	100 cm	FMM D=2mm	GRIGIO	ADULTI PENIENO
0036.305	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	100 cm	FMM D=2mm SCHERMATO	GRIGIO	ADULTI PENIENO
0036.306	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	150 cm	FMM D=2mm SCHERMATO	GRIGIO	ADULTI PENIENO
0036.307	NR	1 COPPIA	NON ELASTICI	150 cm	TUKEL 5 CTT	GRIGIO	ADULTI PENIENO

