

ETUDE DE FONCTION DES CELLULES ENDOTHELIALES

1/ La demande de transport est à compléter et à envoyer à AREATIME par fax au 01.34.02.46.40 ou par mail : demande.transport@area-time.fr; au plus tard la veille du jour du prélèvement, avant 14h.

Le prélèvement de sang sera proposé lors de l'inclusion des patients dans l'étude ou par la suite s'il y a impossibilité de réaliser le prélèvement au moment de l'inclusion. Le diagnostic doit être récent avec absence de traitement. Le code d'identification du patient dans l'étude sera attribué par le Dr Hubert de Boysson.

2/ Stockage/Transport à -80°C

Sang : 5 ml de sang dans un tube sec. avec ou sans gélose (bouchon rouge).



Les tubes sont centrifugés 10 minutes à 1 800 tours/min avec recueil du surnageant (sérum ou plasma), puis conservé à -80°C dans des cryotubes en attendant un transport.

Le prélèvement est congelé à -80°C sur le centre investigateur.

3/ Compléter et joindre aux cryotubes, une feuille d'accompagnement

4/ Enlèvement et livraison à l'hôpital Cochin dans les 24 heures qui suivent.

Réception des tubes à l'hôpital Cochin du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.



Congeler et conserver les cryotubes à -80°C jusqu'au passage du transporteur

Identifier les tubes avec le nom de l'étude, le code d'identification du patient dans l'étude et la date du prélèvement