


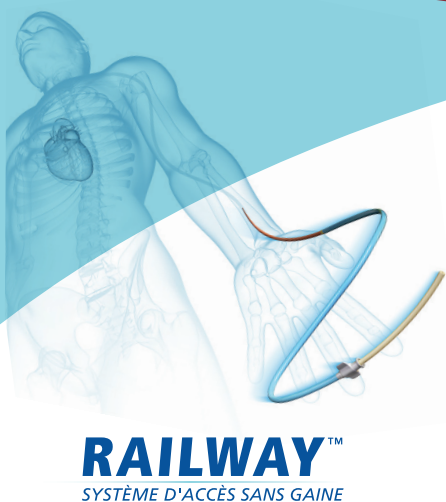


LA TECHNOLOGIE SHEATHLESS* CORDIS

Le système d'accès sans gaine RAILWAY™ est indiqué pour une utilisation dans les procédures par voie radiale nécessitant l'introduction percutanée de dispositifs intravasculaires.

GUIDE D'UTILISATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

ETAPE 1

Sélectionner un **dilatateur** de taille appropriée.
Retirer le dilatateur et les composants du kit de l'emballage en utilisant une technique stérile.
Inspecter le contenu du système pour tout signe de dommage.

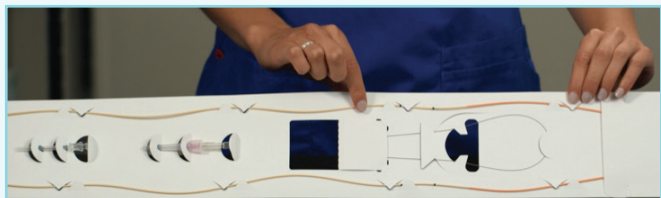


ETAPE 2

Rincer les parties distales ET proximales du **dilatateur** compatible avec le guide 0,021" à travers la sortie Rx.




ETAPE 3

Tremper les 25 cm distaux du **dilatateur** pour activer le revêtement hydrophile.
Si vous utilisez un kit avec un mini guide **hydrophile**, tremper également le mini guide.

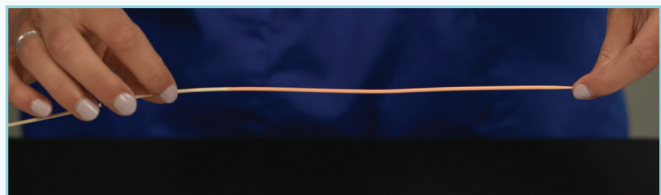


ETAPE 4

Rincer l'aiguille d'accès avant l'utilisation et **préparer le cathéter guide** (CG) de taille compatible en respectant les instructions d'utilisation.

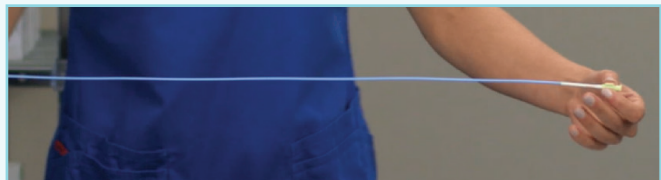

ETAPE 5

Charger l'extrémité distale du CG **sur l'extrémité proximale** du dilatateur. **Avancer le CG** sur l'extrémité proximale du dilatateur jusqu'à ce que l'extrémité du CG soit à environ 5 cm proximale de la sortie Rx du dilatateur.

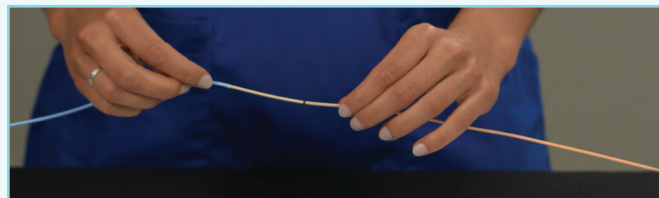

ETAPE 6


Utiliser un scalpel chirurgical pour faire une entaille cutanée superficielle sur le site de ponction. **Introduire l'aiguille**** dans le vaisseau du patient en utilisant une technique médicale acceptée pour l'accès vasculaire.



** Cathéter court veineux ou aiguille métallique

ETAPE 7

Insérer délicatement l'extrémité souple du **mini guide** dans le vaisseau, en le manipulant avec précaution pour empêcher l'entrée dans les branches latérales ou dans l'espace sous-intimal.

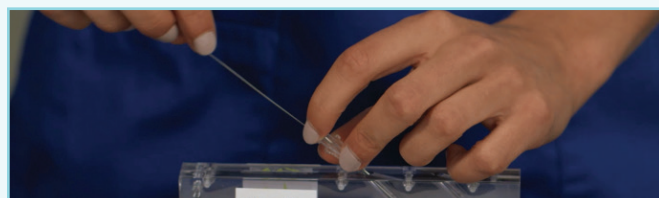


ETAPE 8

Tenir le mini guide en place et **retirer** l'aiguille.




ETAPE 9

Charger l'extrémité distale du **dilatateur** sur le mini guide, avec la sortie Rx orientée vers le haut, et avancer le dans le vaisseau jusqu'à ce que la sortie Rx se trouve à environ 3 cm du site de ponction.

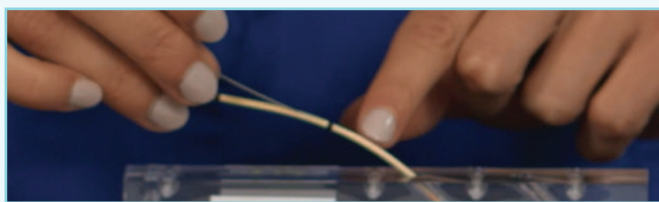

ETAPE 10

Retirer le mini guide à travers la sortie Rx du dilatateur.

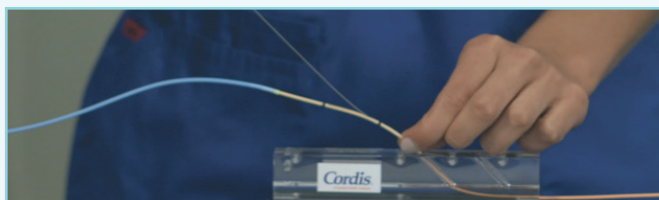


ETAPE 11

Tout en fixant l'extrémité proximale du dilatateur, avancez le CG à travers la peau et le tissu sous-cutané dans le vaisseau.

A. Lorsque vous utilisez un CG de 100 cm, avancez le CG jusqu'à ce que l'embase soit au niveau du marqueur A.

B. Lorsque vous utilisez un CG de 90 cm, avancez le CG jusqu'à ce que l'embase soit au niveau du marqueur B.

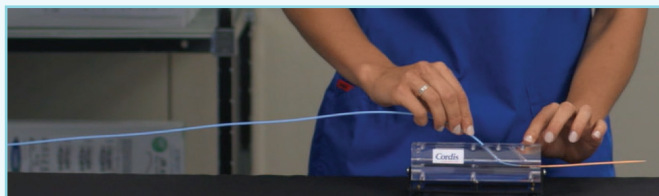

ETAPE 12

Retirer le dilatateur en le retirant du CG tout en maintenant la position du CG.

Administrer les médicaments appropriés à travers l'embase du CG afin de minimiser les complications potentielles, l'inconfort du patient et le vasospasme pendant le cathétérisme.

Un accès "sheathless*" du cathéter guide dans le vaisseau cible a été atteint.

Si nécessaire, l'angiographie des vaisseaux peut être réalisée en injectant un liquide de contraste.



Un guide peut être inséré dans le CG et avancé pour permettre le suivi du CG sur le guide vers le site cible.

ETAPE 13 - TRACKING

Si un support supplémentaire est souhaité lors de l'avancement du CG, retirer le guide (s'il est déjà en place) et **charger le dans le dilatateur compatible 0,035"**.

(a) **Insérer le couple dilatateur et guide** dans le CG jusqu'au marqueur proximal approprié. (b)

Sous guidage fluoroscopique, le dilatateur et le CG peuvent être avancés ensemble sur le guide **jusqu'à l'artère sous-clavière**, en s'assurant que l'extrémité du dilatateur ne dépasse pas l'extrémité du guide. Une fois que l'extrémité du dilatateur atteint la position souhaitée dans l'artère sous-clavière, **retirer** le dilatateur et le guide, puis réinsérer le guide dans le CG et continuer vers le site cible.

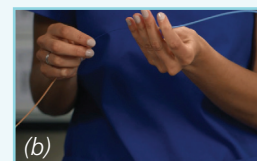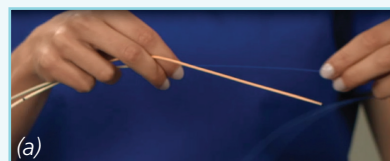

ETAPE 14 - ECHANGE DE CATHETER GUIDE

Assurez-vous qu'un guide 0,035" d'une longueur d'au moins 260 cm est en place pour maintenir l'accès et **retirer le CG**.

Appliquer manuellement une légère pression sur le site de ponction.

Charger le nouveau CG sur le dilatateur compatible 0,035" jusqu'au marqueur approprié.

Charger ensemble le dilatateur 0,035" et le CG sur le guide 0,035".

Insérer le couple dilatateur et CG dans l'artère tout en fixant l'extrémité proximale du guide 0,035".

Le dilatateur peut être retiré une fois que l'accès du nouveau CG est atteint, ou il peut être utilisé pour soutenir l'avancée du CG et retiré une fois que l'extrémité distale du dilatateur atteint la position désirée dans l'artère sous-clavière.



REFERENCES

Catalogue Code	Guide	Dilatateur	Cathéter Guide Recommandé (et Diamètre Interne)	Compatibilité du Guide	Diamètre Externe du Dilatateur
RW5ADTH	Hydrophile	5F Gris	5F Cordis ADROIT™ (0,058")	0,021" et 0,035"	0,057" / 1,45 mm
RW5ADTB	Métallique		5F Cordis VISTA BRITE TIP™ (0,056")	0,021" et 0,035"	0,056" / 1,41 mm
RW5VBTH	Hydrophile				
RW5VBTB	Métallique		6F Cordis ADROIT™ (0,072")	0,021" et 0,035"	0,071" / 1,80 mm
RW6ADTH	Hydrophile	6F Vert	6F Cordis VISTA BRITE TIP™ (0,070")	0,021" et 0,035"	0,070" / 1,77 mm
RW6ADTB	Métallique		7F Cordis VISTA BRITE TIP™ (0,078")	0,021" et 0,035"	0,078" / 1,97 mm
RW6VBTH	Hydrophile				
RW6VBTB	Métallique				
RW7VBTH	Hydrophile	7F Orange	7F Cordis VISTA BRITE TIP™ (0,078")	0,021" et 0,035"	0,078" / 1,97 mm
RW7VBTB	Métallique				

Le système d'accès sans gaine RAILWAY™ est indiqué pour les procédures artérielles radiales nécessitant l'introduction de dispositifs intravasculaires par voie percutanée. Avant utilisation, prendre connaissance des « Notices d'utilisation » jointes à chaque produit pour connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l'utilisation recommandée, les mises en garde et les précautions. Dans un souci de constante amélioration de ses produits, Cordis se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis. Le système d'accès sans gaine RAILWAY™ est pris en charge par l'assurance maladie au travers des Groupes Homogènes de Séjour. Dispositif médical de classe IIa (BSI 0086). Mandataire Européen : Cordis Cashel (Irlande). « Document réservé à l'utilisation des professionnels de santé ». Avril 2018. 100513877.

© 2018 Cardinal Health. Tous droits réservés. CORDIS, le LOGO Cordis, RAILWAY, ADROIT et VISTA BRITE TIP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cardinal Health et peuvent être enregistrées aux États-Unis et / ou dans d'autres pays.

CORDIS une division de CARDINAL HEALTH FRANCE 506 SAS, 43 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux RCS Paris 812 365 609.