

Critères d'évaluation du patient



Taille (mm)

23

26

29

34

Diamètre minimal des vaisseaux (mm)

≥ 5,0

≥ 6,0

Diamètre de l'anneau (mm)

18 - 20

20 - 23

23 - 26

26 - 30

Périmètre de l'anneau (mm, $P=D \times \pi$)

56,5 - 62,8

62,8 - 72,3

72,3 - 81,7

81,7 - 94,2

Diamètre moyen des sinus de Valsalva (mm)

≥ 25

≥ 27

≥ 29

≥ 31


Hauteur moyenne des sinus de Valsalva (mm)

≥ 15

≥ 16

Vérifiez l'emplacement du greffon veineux saphène

- (A) Diamètre de l'anneau
- (B) Diamètre des sinus de Valsalva
- (C) Hauteur des sinus de Valsalva
- (D) Hauteur de la structure (≈ 45 mm, en excluant les palettes)

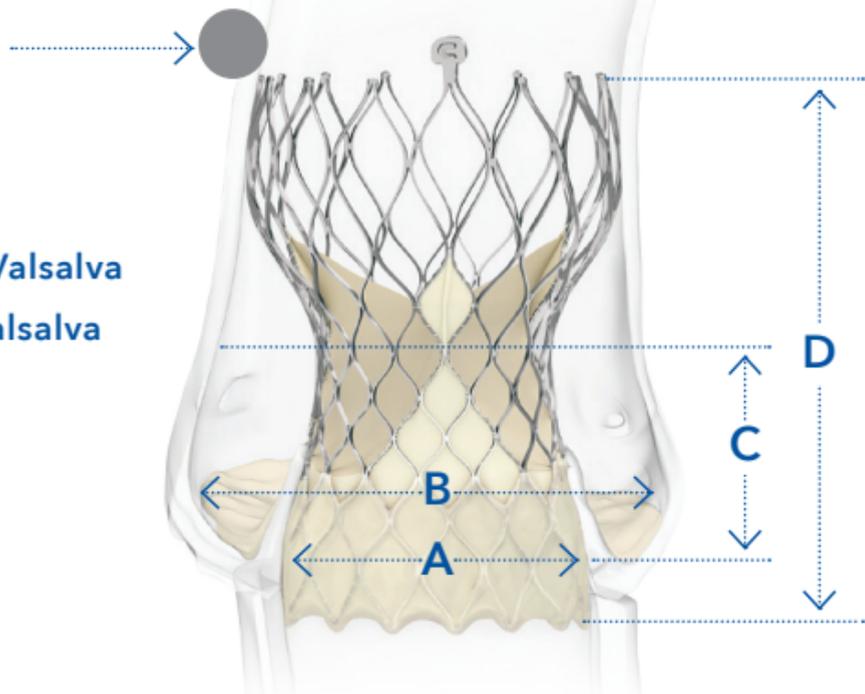

L'illustration n'est pas à l'échelle. Les informations contenues dans le présent document ont une visée pédagogique et ne se substituent aucunement au protocole, au mode d'emploi ou à la formation sur le produit.

CoreValve™ Evolut™ PRO+ est un dispositif médical implantable de classe III - CE n°2797.

Medtronic France S.A.S.

9, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris
Tél. : 01 55 38 17 00 - Fax : 01 55 38 18 00

RCS Paris 722 008 232

UC202206627aFF © Medtronic
France 2021. Tous droits réservés.
Crédit photo : Medtronic.

Medtronic